

TIGGES-Rumpfstützorthese

mit extrem **flacher** Gliederpelotte

Wirkungsweise

Die **TIGGES-Rumpfstützorthese** stabilisiert die LWS-/BWS und unterstützt die Bauch- und Rückenmuskulatur durch im Rückenteil eingearbeitete Stützelemente. Der entlastende abdominale Druck wird durch das kompressionsstarke Material und die im Innenteil zusätzlich eingearbeiteten Zugelemente erzielt. Bei Patientinnen mit ausgeprägter abdominaler Adipositas, bei

denen eine verstärkte Stabilisierung der LWS-/BWS notwendig ist, kann die erforderliche Abdominalsuspension durch die Verordnung einer zusätzlichen Innenbinde erreicht werden. Die Rumpforthese erzielt darüber hinaus eine endgradige Bewegungseinschränkung, Rotationen sind nur noch bedingt möglich.



TIGGES-Rumpfstützorthese





TIGGES-Rumpfstützorthese mit Innenbinde

Zusätzliche Wirkung der extrem flachen Gliederpelotte

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rumpfstützorthesen bietet die im Rückenteil zusätzlich eingearbeitete extrem flache **TIGGES-Gliederpelotte** den zusätzlich großen Vorteil, dass der durch den starken Zug (Anhebung des Abdomen) im Rücken bewirkte Druck so abgefangen wird, dass nicht der schmerzhaft erkrankte Bereich der LWS, sondern die bei-

derseits der Wirbelsäule verlaufenden Muskelwülste und das Kreuzbein belastet werden. Hinzu kommt eine leichte Massage der Lendenmuskulatur durch die einzelnen Segmente der Pelotte, die Folge ist eine bessere Durchblutung und Entspannung der meist verspannten Muskulatur.

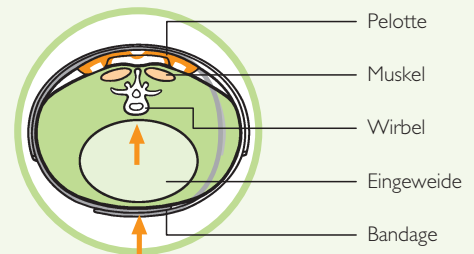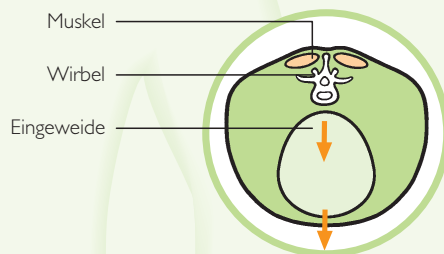

Indikationen

Bei Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-/BWS-Bereich; Dorso-Lumbalgie; degenerative Veränderung im LWS-/BWS-Bereich; Instabilitäten im LWS-/BWS-Bereich.

Indikation für zusätzliche Innenbinde

Alle nebenstehenden Indikationen mit ausgeprägter abdominaler Adipositas, bei denen eine Stabilisierung der LWS-/BWS bei zusätzlicher Abdominalsuspension notwendig ist.

Rezeptierung: TIGGES-Rumpfstützorthese

HMV-Nr. 23.15.03.0004

Rezeptierung: TIGGES-Rumpfstützorthese mit Innenbinde

HMV-Nr. 23.15.03.1002

TIGGES innovative Modul-Orthesen



Bitte ankreuzen!

mit Zwickel

Hilfsmittel-Nr.

Art.-Nr.

TIGGES-Rumpfstützorthese

23.15.03.0004

71.309

TIGGES-Rumpfstützorthese mit Innenbinde

23.15.03.1002

71.509

Kommission

Name:

Betreuende/r Bandagist/in:

Geboren am:

Gemessen:


unbekleidet

auf Mieder

Größe: cm

Anprobe am:

Umfangmaße

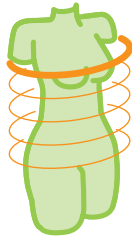


Brustumfang

..... cm




Unterbrustweite

..... cm

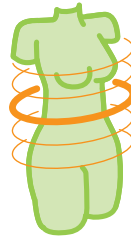

Tailenweite

..... cm

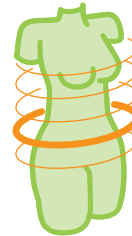

Leibweite


..... cm



Hüftweite

..... cm


Höhenmaße

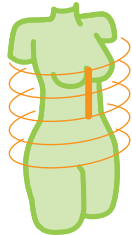

Ausschnitt

Taille bis Ausschnittshöhe


..... cm

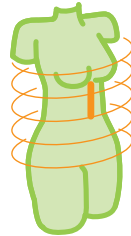

Tailenhöhe

Taille bis unterer Brustansatz


..... cm

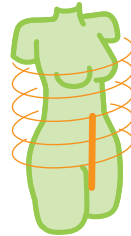

Leibhöhe vorne

Taille bis unterer Abschluss


..... cm

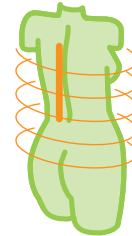

Rückenhöhe

Taille bis oberer Abschluss

..... cm

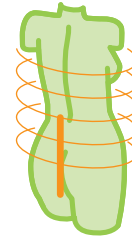

Hintere Höhe

Taille bis unterer Abschluss

..... cm

Brustmaße

Über gut sitzenden BH messen!



Brusthöhe

..... cm



Brustbreite

..... cm

Figur

Rücken:

starke Lordose

Rundrücken

Skoliose

Gesäß:

flach

ausgeprägt

Abdomen:

fest

gewölbt

Hängebauch

weich

flach

Hernie

Sonstiges

.....

.....

Die halbfertige TIGGES-Rumpfstützorthese wird

voraussichtlich: bei uns im Haus fertiggestellt

bei TIGGES-Zours fertiggestellt

(Fertigstellung nach Aufwand)

Stempel/Datum/Unterschrift

TIGGES innovative Modul-Orthesen

TIGGES-Zours GmbH

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0

Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29

D-45525 Hattingen

E-Mail tigg@zours.de

Am Beul 10

Internet www.zours.de

Das Risiko für fehlerhafte Maßangaben trägt der Besteller.



0000/00/0516